


このたびは、「医廃物容器フレーム」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、本書に記載の使用方法に従い、末永くご愛用くださいますようお願い申し上げます。また、お読みになった後はいつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

⚠️ ご注意 製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。


- 火気の近くでは使用しないでください。
- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 必ず屋根のある場所に設置し、直射日光や雨を避けてください。
- 乱暴な取扱いや不適切な設置はしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本体が水平に保てる場所でご使用ください。凹凸の多い場所や傾斜のある場所では、製品が転倒し、ケガや事故また、本体の破損の恐れがあります。
- 通行の妨げにならない場所に設置してください。製品と接触してケガや事故の原因になります。
- 製品にもたれかかったり、腰掛けたりしないでください。製品の転倒や破損、ケガの恐れがあります。
- 製品の設置、およびアジャスター調整の際は必ず二人以上で行ってください。製品の転倒や破損、ケガの恐れがあります。
- 使用中にねじなどのゆるみが生じましたら、締め直してください。
- 製品の設置、およびアジャスター調整の際はアジャスターの下へ手や指を入れないようご注意ください。
- フタの隙間付近に手を入れないでください。ケガの恐れがあります。
- 製品の上に物を載せないでください。製品の故障や破損、ケガの恐れがあります。
- 危険物を製品に近づけたり、投入しないでください。破損の原因になります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 機器の破損や容器のズレなどを防ぐため、ペダルはゆっくり踏み込んでください。
- 本体の移動の際には取手を持ち、本体が水平な状態で移動してください。

アジャスターの調整方法


本体を少し持ち上げながら、底に付いているアジャスターを回し、本体が水平になるように調整します。

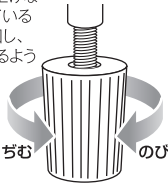

梱包内容と各部名称

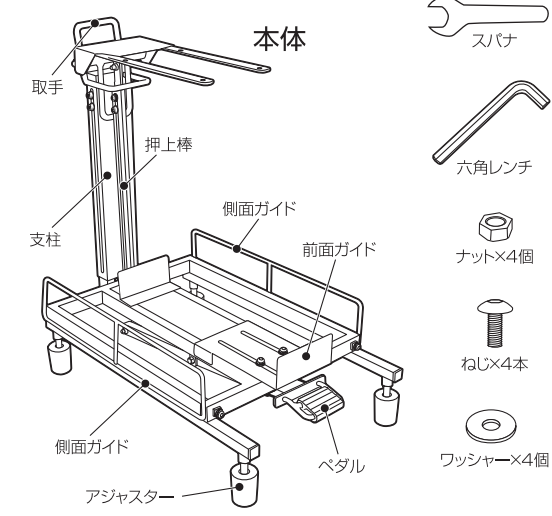

医廃物容器フレーム用 フタ(別売)

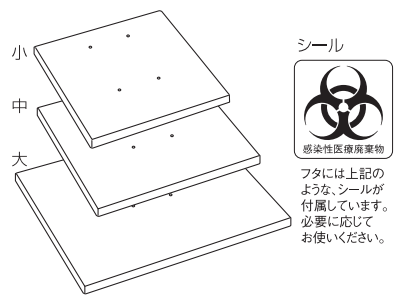

品番	サイズ
DS-241-210-0	小:約W350×D350×H25mm
DS-241-220-0	中:約W415×D415×H25mm
DS-241-230-0	大:約W540×D435×H25mm


※まずは使用する医廃物容器のサイズを確認してください。上記以外のサイズをお求めの場合は、弊社または係員までお問い合わせください。  
※フタのサイズはセットする医廃物容器に対して、余裕を持った大きさをお選びください。

本体サイズ	最小:約W320×D524×H514mm 最大:約W580×D610×H772mm	対応する 容器サイズ	最小:約W300×D285×H360mm 最大:約W500×D400×H620mm
-------	--	---------------	--

使用方法


1 各部(○印)で図示したねじ(12ヵ所)をゆるめます。

下記に○印で表示されているねじを六角レンチでゆるめます。

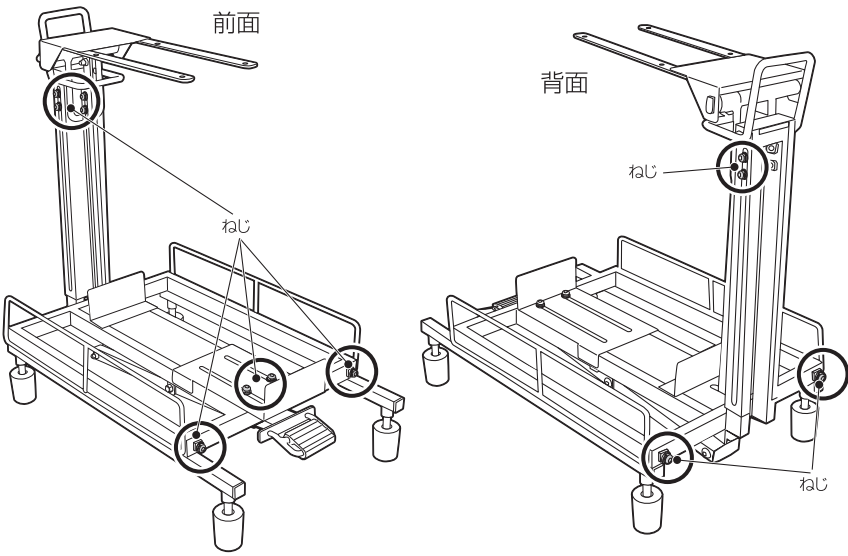


2 本体フレームを横に倒し、(○印)で図示したねじ(2ヵ所)をゆるめます。

下記に○印で表示されているねじを六角レンチでゆるめます。

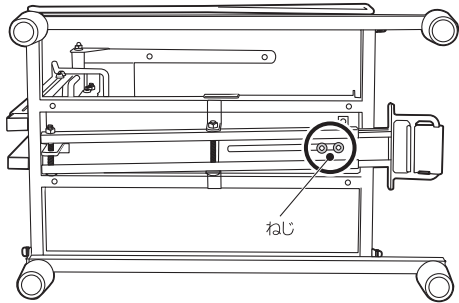

3 フタを取り付ける


医廃物容器フレーム用 フタ(別売)を  
下図のように取り付けてください。

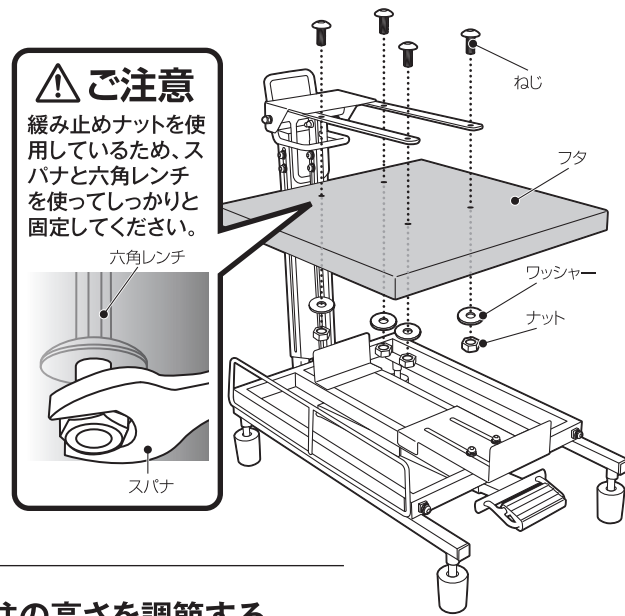

4 医廃物容器をセットして、ガイドを調節する。


お使いになる医廃物容器を本体にセットします。

側面ガイド・前面ガイドを医廃物容器に合わせて、六角レンチでねじを固定します。  
※前面ガイドをねじ締めするときは、一度、医廃物容器を取り除いてください。

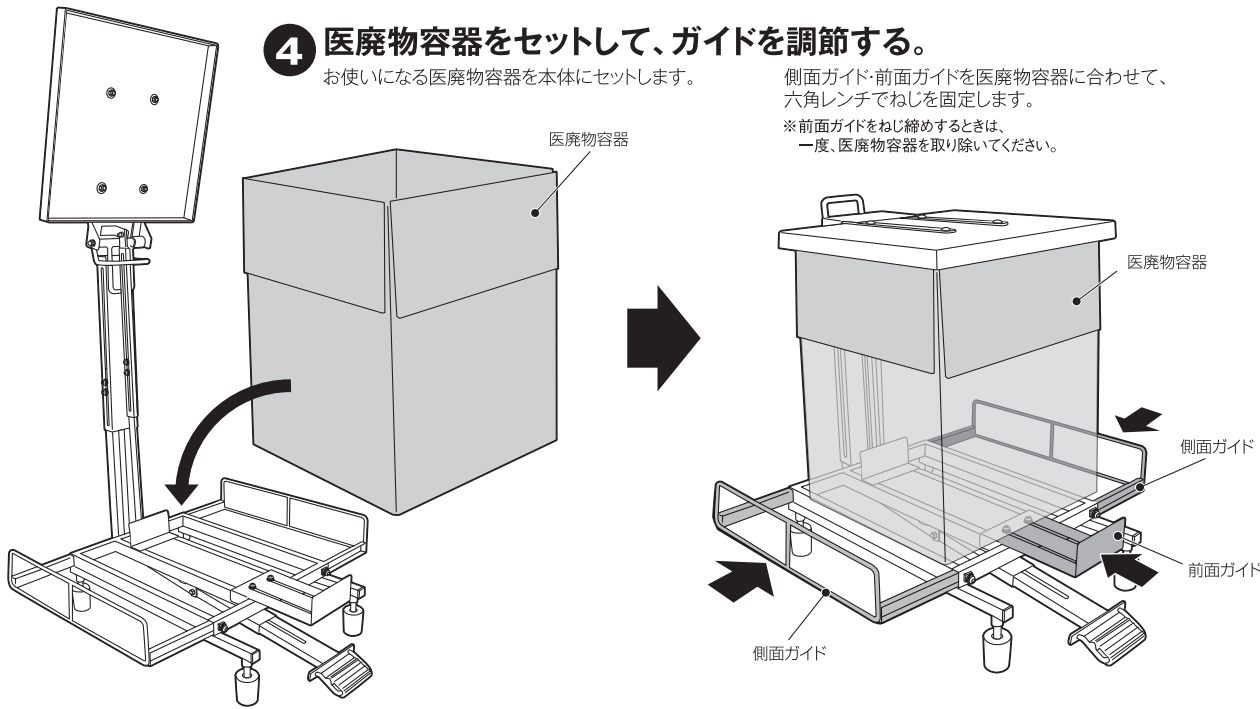


5 支柱の高さを調節する。

支柱の高さを調節して、六角レンチでねじを固定します。  
※フタが水平になる位置に合わせてください。

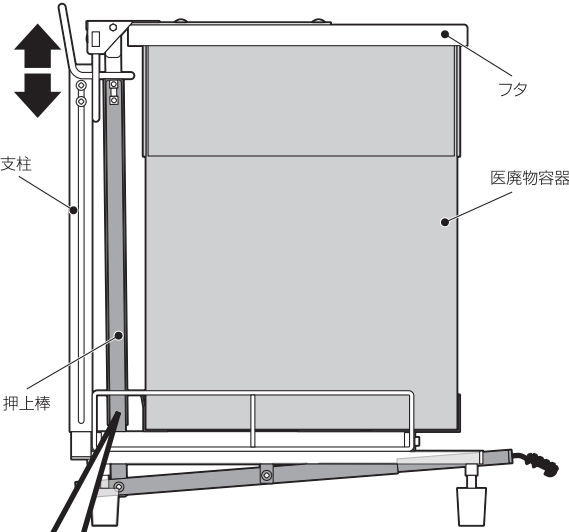


6 ペダルの位置を調節する。

ペダルをほど良い位置に合わせて、本体を横に倒し、底面側のねじを固定します。

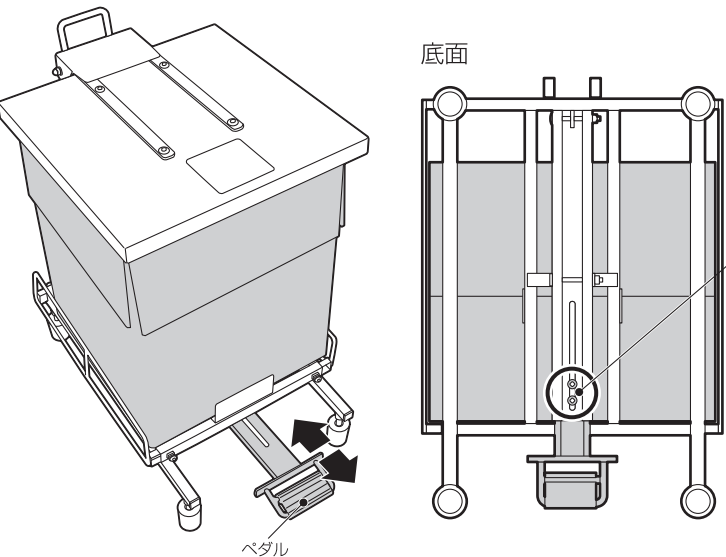


7 開閉の確認を行う。

ねじの締め忘れがないことを確認し、ペダルを踏んで、開閉に支障がないか確認してください。  
※機器の破損や容器のズレなどを防ぐため、ペダルはゆっくり踏み込んでください。

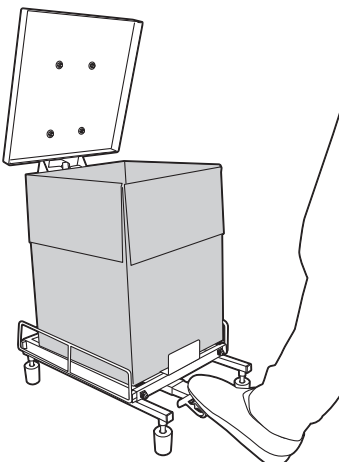

医廃物容器の交換方法

容器の取り替えについては、ペダルを踏んでフタを開けた状態にして容器を取り出し、新しい容器をセットしてください。

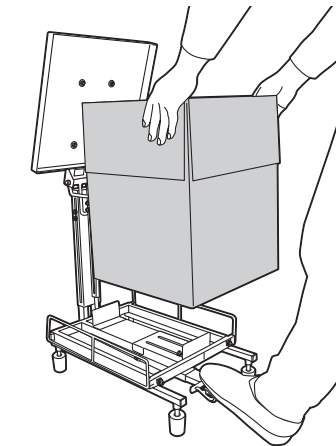

お手入れ

柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めたものを布に含ませ表面を拭きます。きれいに汚れが拭き取れた後、乾いた布でから拭きをして水気を取ってください。

※中性洗剤以外の洗剤や薬品などを使用したお手入れは、表面の劣化や破損の原因になる恐れがありますのでご注意ください。

※シンナー類、クレンジャー、金属たわし、ナイロンたわし、漂白剤は使用しないでください。